

Informácia o použití

ECOTEST - HELIKOBAKTER PYLORI TEST

Charakteristika



Helikobakter pylori test - test zo vzorky stolice - in vitro -

- len na vonkajšie použitie (určený na domáce použitie)

Test slúži na zistenie prítomnosti baktérie helikobakter pylori v organizme. Odporúča sa ako preventívne vyšetrenie v domácich podmienkach a kontrolné vyšetrenie po liečbe helikobaktera.

Legenda

Vrchná časť testu

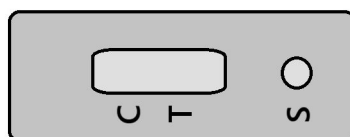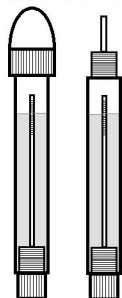

Výsledková doštička

Spodná časť testu

Výrobca

Assure Tech (Hangzhou) Co, Westlake ECO.

Zone, Hangzhou, Čína

EC-REP - Zastúpenie pre EÚ: Wellkang Ltd. Suite B,

29 Harley Street

LONDON, W1G 9QR, U.K.

Distribútor:

Pavol Bojda, Čab 198, 95124, Slovensko



8 588006 048056 >


Dátum expirácie / použite do: 02/2018 Číslo šarže: L603074

Návod

1. Odskrutkujte modrý vrchnák s testovacou tyčinkou zo spodnej časti skúmavky (pritom skúmavku držte tak, aby z nej nevytiekol roztok) a ponorte špičku testovacej tyčinky (celý závit) do vzorky stolice na rôznych miestach (maximálne toľko stolice, koľko pojme závit).
2. Testovaciu tyčinku vložte späť do spodnej časti skúmavky, dobre zaskrutkujte a dôkladne pretrepte.
3. Pripravte si výsledkovú doštičku testu na rovný podklad.
4. Odskrutkujte biely vrchnák z uzavretej vrchnej časti skúmavky, odlomte plastovú špičku na skúmavke a vytlačte 3 kvapky do okienka S na výsledkovej doštičke.
5. Po 10 minútach sa na výsledkovej doštičke vyobrazí 1 alebo 2 čiarky v závislosti od výsledku testu. Vyobrazenie po 15 minútach testu už neodčítavajte.


Výsledok testu

Nesprávne vykonaný test

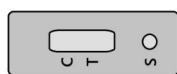


Test bol vykonaný nesprávne, ak sa na výsledkovej doštičke nezjavila žiadna čiarka v stanovenom časovom limite (10 minút).

Správne vykonaný test: negatívny výsledok testu

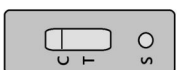

Ak sa na výsledkovej doštičke vyobrazí jedna čiarka pri značke C, vzorka testu nepotvrdila výskyt baktérie *Helicobacter pylori*.

Správne vykonaný test: pozitívny výsledok testu

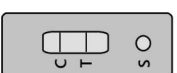

Ak sa na výsledkovej doštičke vyobrazia dve čiarky pri značke C a T (pričom intenzita ich sfarbenia môže byť rôzna), vzorka testu potvrdila výskyt baktérie *Helicobacter pylori*.

Upozornenie

Chráňte pred dosahom detí. Test je určený len na jedno použitie. Vystríhajte sa priameho kontaktu s roztokom testu, pri styku s pokožkou môže spôsobiť podráždenie a je nutné okamžité dôkladné umytie postihnutého miesta. Zvyšky testu je nutné po použití vyhodiť, a dozrieť, aby sa nedostali do styku s inými osobami. Skladujte pri teplote 4-30°C, nezmrazujte, nepoužívajte po uplynutí expiračnej lehoty.